

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык: Отливка модели по оттиску

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая

Дата
ФИО

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/Нет
	Подготовка к работе			
1.	Ознакомиться с заказ – нарядом на изготовление протеза	Выполнить	2	
2.	Промыть оттискную ложку с оттиском от дезинфицирующего средства струёй воды в течение 30 секунд	Выполнить	2	
3.	Оценить качество оттиска	Сказать	1,5	
4.	Взять резиновую колбу для гипса и поставить её на гипсовочный стол	Выполнить	2	
5.	Взять шпатель для замешивания гипса и положить его на гипсовочный стол	Выполнить	1,5	
6.	Подготовить гипс	Выполнить	1	
	Выполнение работы			
7.	Налить в мерный стакан 30-50 мл холодной воды	Выполнить	2	
8.	Воду налить в резиновую колбу для гипса	Выполнить	2	
9.	Насыпать гипс в воду до насыщения	Выполнить	2	
10.	Перемешать гипс с помощью шпателя для замешивания гипса до сметанообразной консистенции	Выполнить	2,5	
11.	Включить вибростол нажатием кнопки	Выполнить	1	
12.	Поместить оттискную ложку с оттиском на поверхность вибростола	Выполнить	2	
13.	Распределить первые порции гипса шпателем для замешивания гипса на выступающие поверхности оттискной ложки с оттиском	Выполнить	3	
14.	Заполнить оттискную ложку с оттиском гипсом до его краёв	Выполнить	3	
			Итого 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)